

GeeSonic 取扱説明書

商品仕様:

製品名称: GeeSonic
アンテナ: WiFiモジュール(内蔵)
動作周波数: 2.4GHz
バッテリー: 350mAh
画像転送速度: 30fps
本体重量: 21g
バッテリー駆動時間: 120分
充電時間: 1時間
画素: 500W
ジャイロセンサー: 3軸
入力電流: DC 5V 300mA
動作環境温度: -10~50°C



まず、専用アプリをダウンロードしてください

カバーを開けると、機器とWi-Fiが起動します。
カバーを閉じると、機器が停止します。



カバーを開けると紫色に点滅します。
Wi-Fiに接続を待機中になります。

耳垢収納箱を矢印の方向に開くと、
使用する耳垢を選ぶことができます。



耳かき用アクセサリ:

- 1、肌にやさしいシリコン製のイヤースプーン。
- 2、透明な素材のイヤースプーン。
- 3、レンズを清潔に保つための綿棒。

イヤースプーンはお客様の耳ケアに合わせて変えられるサイズや、家族内でも使う人によって色分けができるようになっています。

お使いの際にははっきり本体にイヤースプーンを設置して、使用後は清潔にメンテナンスしてから、専用ケースに収納してください。

カバーを閉める前にイヤースプーンがカバーに挟まれないように、必ずイヤースプーンを取り外してください！

ご使用方法:

1、カバーを開けると、装置は起動し、15秒間紫色の光が点滅します。この間にWi-Fiをペアリングしてください。

2、スマートフォンを開き、設定のWi-Fi画面に入り、「BRXXX」という名前のWi-Fiを検索して接続します。ペアリングを行ってください。



注意: 紫色の光が点滅する間に正常にペアリングできない場合は、カバーを再び閉じ、再度電源を入れてください。紫色の光が点滅したら、Wi-Fi名を検索して新たにペアリングしてください。

3、ペアリング成功後、「ULOOK」アプリを開き、「start」ボタンをクリックします。

4、装置を正しくセットアップしたら、イヤースプーンを取り付けて使用できます。

カメラ機能:

ビデオ、スクリーンショット、耳チェックのルーティン(zoom)三つのボタンがあります。

カメラはノーマルモードと3Dジャイロモードがあります。

ノーマルモードは主に鼻や口内など、一般的に細部が気になる箇所を見るために幅広くお使いいただけます。

「zoom」のボタンを押すと、3Dジャイロモードは耳かき専用のモードになります。本体をどのようにひねっても、画像は直立したまま表示することができます。タップするとモードが切り替わります。ご利用前に違いをお試しください。

トラブル解決:

Q1: Google Play Storeでこのアプリをダウンロードできません。

A1: このアプリはウイルスを含んでいません。「許可」をクリックしてダウンロードしてください。

Q2: 充電線を差し込んでも電源インジケータが点灯しない。

A2: 充電線が故障している可能性があります。別の充電線を試してみるか、カスタマーサポートにお問い合わせください。

Q3: 製品が「ULOOK」アプリに正常に接続された後、リアルタイムイメージが正常に表示されない。

A3: Wi-Fi接続が不安定であり、時折数秒で切断される可能性があります。

充電ポート:

MICO 5PIN-USBが采耳ペンの充電要件を満たします。

装置の電池が不足している場合、充電中に白いインジケータが点滅します。

指示灯が消灯すると、装置は充電が完了しました。



注意:

- 力を入れすぎると先端のアタッチメントが外れたり、外耳道を傷つけることに繋がりますので、適度な力加減でご使用下さい。本体にイヤースプーンを装着した状態で、イヤースプーンの先端を手のひらなどに押し当ててみてアタッチメントが簡単に外れないか、また適度な力加減になっているかをよくお確かめの上、ご利用下さい。
- 本製品は医療機器として開発されていませんので医療行為で使用することはお避け下さい。
- 耳掃除のやり過ぎや、強い力をかけて掃除を行うことは耳のトラブルにつながります。
- 耳の異常を感じた場合は専門医の診察を受けて下さい。当社では治療に関するご相談は回答いたしかねます。
- 内蔵カメラが故障した際は直ちに使用を中止し、修理交換についてお問い合わせ下さい
- お子様にご利用の場合は周囲の安全を確保し、必ず大人の方がご使用ください。お子様に対してお使いいただけますが、お子様が本製品を直接操作することはできません。お子様はアプリ映像をご覧いただくことができます。